

## GOTAS OFTÁLMICAS

Solución oftálmica antioxidante y lubricante con Hialuronato Sódico, Vitamina A y Vitamina E

**ES**

### COMPOSICIÓN:

**Hialuronato Sódico 0,15%, Carboximetil Beta-Glucano, Vitamina A Palmitato, Vitamina E TPGS, SCO™** en una solución isotónica tamponada pH 7,0.

### DESCRIPCIÓN:

**NAVITAE® PLUS** es una solución oftálmica que contiene sustancias lubricantes de origen polisacárido tales como el **Hialuronato Sódico** y el **Carboximetil Beta-Glucano** y un sistema lubricante y protector lipofílico compuesto de **Vitamina A** y **Vitamina E** pegilada.

El uso tópico ocular de la **Vitamina A** mejora el uso de lentes de contacto reduciendo los daños por fricción, que pudieran causar en las células epiteliales de la córnea y la conjuntiva.

La **Vitamina A** estabiliza la fase oleosa del film lacrimonal, incrementando la capacidad de mantener la hidratación natural, y por tanto reduciendo los síntomas de la sequedad ocular. Esta actividad es también ejercida por los polisacáridos que contiene el producto.

La **Vitamina E** es un antioxidante que ayuda a reducir la concentración de radicales libres en el fluido lacrimonal, y por tanto incrementa la protección de las células epiteliales de la córnea y la conjuntiva, disminuyendo el riesgo de inflamación.

**NAVITAE® PLUS** se conserva con un sistema conservante especial llamado **SCO™** (Stabilized complex Oxychloro) que mantiene la solución estéril en la botella. Cuando se expone a la luz, **SCO™** se disipa en componentes naturales de las lágrimas humanas, tales como cloruro de sodio, oxígeno y agua, haciendo que sea muy bien tolerado.

### INDICACIONES:

**NAVITAE® PLUS** es una solución oftálmica lubricante con efecto antioxidante y humectante, indicada para el alivio del ojo seco y el malestar ocular causado por:

- Irritación ocular debida a patologías tales como queratitis, reacciones adversas después de una cirugía ocular, úlceras traumáticas, inflamación corneal.
- Estrés oxidativo debido a exposición a la luz y/o un incremento de los radicales libres en la superficie ocular.
- Uso de lentes de contacto.

**NAVITAE® PLUS es compatible con todo tipo de lentes de contacto.**

### INSTRUCCIONES DE USO:

- Lave, aclare y seque sus manos cuidadosamente.
- Asegúrese de que el precinto está intacto.
- Para abrir la botella, desenrosque completamente el tapón y rompa el precinto.
- Instile 1 ó 2 gotas en cada ojo, 3 a 6 veces al día o según indique su especialista.
- Cierre bien la botella después de usarla.

### PRECAUCIONES:

- Para prevenir posibles contaminaciones, no permita que la punta del gotero esté en contacto con ninguna superficie ni con el ojo.
- No utilizar en caso de hipersensibilidad específica a cualquiera de los componentes.
- En algunos casos, en ojos ligeramente sensibles, puede causar un leve escozor o irritación al aplicarlo, que desaparece después de parpadear.
- Si la irritación ocular persiste y tiene dolor, rojez o cambio en la visión después de la instilación, consulte a su especialista.
- No ingerir la solución.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No usar después de la fecha de caducidad.
- Una vez abierta la botella, la solución debe usarse dentro de los siguientes 90 días.
- No utilizar si la botella está dañada.
- **No exponer directamente a la luz del sol.**

### ALMACENAMIENTO:

- Conservar a una temperatura de entre 5° y 35°C y proteger de una fuente directa de luz.


**3 ml (muestra gratuita)**

REF D3NP117

**15 ml**

REF D15NP116

STERILE | A

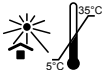

Distribuidor en España:  
**Laboratorios LLORENS, S.L.**  
C/ Ciudad de Balaguer, 7-11  
08022 Barcelona - ESPAÑA

**NOVAX® PHARMA**  
Le Coronado  
20, Av. de Fontvieille  
MC 98000 MONACO  
www.novaxpharma.com

**CE**  
0051

V2 - Rev. 06/07/2018